

JOINSTAR CE SELBSTTEST 1er (COLLOIDAL GOLD)

zum qualitativen Nachweis neuartiger Coronaviren in anterior-nasalen (kurze Nase!) Abstrichproben; CE-zertifiziert als Selbsttest zur Eigenanwendung in Soft Bag



auf einem Polster das mit einem SARS-CoV-2-Antikörperkonjugat auf dem Polster beschichtet ist. Dann wandert das Gemisch durch Kapillarwirkung nach oben auf das Membranchromatogramm und reagiert mit einem SARS-CoV-2-Antikörper in der Nachweiszone. Wenn die Probe SARS-CoV-2 enthält, erscheint im Bereich der Testlinie (T) eine farbige Linie, die ein positives Ergebnis anzeigt. Wenn die Probe kein SARS-CoV-2 enthält, erscheint in diesem Bereich keine farbige Linie, was auf ein negatives Ergebnis hinweist. Als Prozesskontrolle erscheint im Bereich der Kontrolllinie (C) immer eine farbige Linie, die anzeigt das ein geeignetes Probenvolumen zugegeben wurde und ein Membrankernziehen stattgefunden hat.

Bestandteile

1. Coronavirus-Antigen-Testkassette
2. Extraktionspuffer
3. Steriler Tupper (für die Probenentnahme)
4. Müllbeutel für Gefahrstoffe
5. Gebrauchsanweisung in Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch und Portugiesisch

Lagerung und Haltbarkeit

1. Der Test ist 2 Jahre haltbar, wenn alle Teile in versiegelten Beuteln bei +2°C bis 30°C gelagert werden und die Verpackung ungeöffnet und unbeschädigt ist.
2. Der Test sollte bis zur Verwendung im versiegelten Beutel aufbewahrt werden. Frieren Sie den Test nicht ein und verwenden Sie ihn nicht nach Ablauf des Verfallsdatums.
3. Herstellungsdatum und Verfallsdatum siehe Etikett.

Ihre Vorteile im Überblick:

- Anterior-nasal (kurze Nase!) Test in Soft Bag
- Spezifität: 99,2% Sensitivität: 96,1%
- Leicht zu bedienen, Ergebnis in 15 Minuten
- Alle Testkomponenten sind enthalten
- Ergebnisse zeigen keine Kreuzreaktivität
- Haltbarkeit: 2 Jahre
- BfArM gelistet
- PEI (Paul-Ehrlich-Institut) evaluiert
- CE-zertifiziert als Selbsttest zur Eigenanwendung

Produkt

Joinstar COVID-19 Antigen Rapid Test (Colloidal Gold) – CE: Jetzt auch CE-zertifiziert für die Eigenanwendung zum Verkauf in der gesamten EU (BfArM-Test-ID AT1276/21)

Technische Daten

Verpackt in Soft Bags: 1 Test/Kit; VPE: 400 Test Kits

Verwendungszweck

Der COVID-19 Antigen Assay (kolloidales Gold) ist ein qualitativer Test auf Basis eines Immunoassays zum Nachweis von SARS-CoV-2 Nucleocapsid-Protein-Antigenen in Abstrichproben. Während dieses Tests reagiert die Probe

JOINSTAR CE SELBSTTEST 1er (COLLOIDAL GOLD): CE-zertifizierter Selbsttest zur Eigenanwendung

Corona-Schnelltestmit anterior-nasalen (kurze Nase!) Abstrichproben

| Joinstar COVID-19 Antigen Rapid Test (Colloidal Gold) - CE | CE zertifiziert als Selbsttest zur Eigenanwendung | anterior-nasale (kurze Nase!) Proben | Spezifität 99,2 % | Sensitivität 96,1% | Lagerung bei Raumtemperatur | Verpackt in Soft Bags: 1 Test/Kit; VPE: 400 Test Kits |
|--|---|---|---|-------------------------|---|---|
| EAN Code: 9180001670134 | Kartoninhalt: 400 Tests | Höhe 29 cm Breite 39 cm Länge 59 cm | Gewicht: Einzelartikel: 0,026 KG Karton: 10,4 KG | Europalette: 9600 Tests | 4 Kartons/Lage; 6 Lagen hoch; Höhe: ca 185 cm | 32 Paletten pro LKW = 307.200 Tests pro LKW |

Nähere Informationen und Anfragen:

Mag. Gerald Neumair, gn@alpstar.at, M: +43-664-4101918

Hr. GF Thomas Lachmann, TL@alpstar.at, M: +43-664-2453397

ALPSTAR Medical Products, eine Unternehmung der ALPSTAR Beteiligungs GmbH | GERLGASSE 2 | 1030 VIENNA | AUSTRIA

HG Wien, FN 457054p | UID ATU 71406203