


Clungene® Covid-19 Antigen Rapid Test – Selbsttest CE1434

zum qualitativen Nachweis von Coronaviren in anterior-nasalen (kurze Nase!) Abstrichproben; CE1434 zertifiziert als Selbsttest zur Eigenanwendung

WIZBIOTECH CE1434: CE-zertifiziert für die Eigenanwendung zum Verkauf in der gesamten EU

1 Test/Kit – Karton: VPE: 400 Test Kits

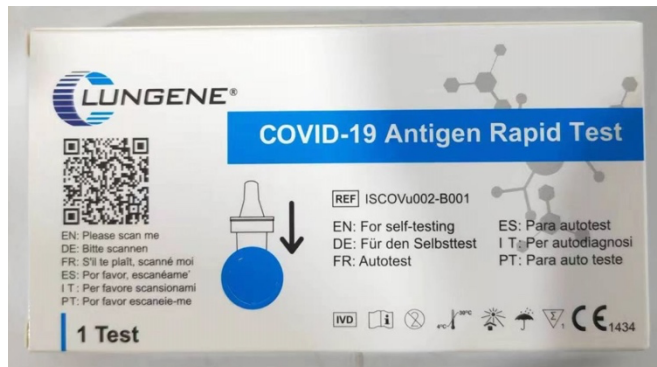

5 Tests/Kit – Karton: VPE: 240 5er Packs = 1.200 Tests



Verwendungszweck

Der COVID-19 Antigen Assay (kolloidales Gold) ist ein qualitativer Test auf Basis eines Immunoassays zum Nachweis von SARS-CoV-2 Nucleocapsid-Protein-Antigenen in Abstrichproben. Während dieses Tests reagiert die Probe mit einem Anti-SARS-CoV-2-Antikörperkonjugat auf dem Polster, das mit Partikeln beschichtet ist und dann wandert das Gemisch durch Kapillarwirkung nach oben auf das Membranchromatogramm und reagiert mit einem SARS-CoV-2-Antikörper in der Nachweiszone. Wenn die Probe SARS-CoV-2 enthält, erscheint im Bereich der Testlinie eine farbige Linie, die ein positives Ergebnis anzeigt. Wenn die Probe kein SARSCoV-2 enthält, erscheint in diesem Bereich keine farbige Linie, was auf ein negatives Ergebnis hinweist. Als Prozesskontrolle erscheint im Bereich der Kontrolllinie immer eine farbige Linie, die anzeigt, dass ein geeignetes Probenvolumen zugegeben wurde und ein Membrankernziehen stattgefunden hat.

Bestandteile

1. Coronavirus-Antigen-Testkassette
2. vorgefüllter Extraktionspuffer
3. Steriler Tupfer (für die Probenentnahme)
4. Gebrauchsanweisung
5. Biosicherheitsbeutel

Lagerung und Haltbarkeit

1. Der Test ist 2 Jahre haltbar, wenn alle Teile in versiegelten Beuteln bei +2°C bis 30°C gelagert werden und die Verpackung ungeöffnet und unbeschädigt ist.
2. Der Test sollte bis zur Verwendung im versiegelten Beutel aufbewahrt werden. Frieren Sie den Test nicht ein und verwenden Sie ihn nicht nach Ablauf des Verfallsdatums.
3. Herstellungsdatum und Verfallsdatum siehe Etikett.

Ihre Vorteile im Überblick:

- Anterior-nasal (kurze Nase!) Test
- Spezifität: 100 %, Sensitivität: >95%
- Leicht zu bedienen, Ergebnis in 15 Minuten
- Alle Testkomponenten sind enthalten
- Haltbarkeit: 2 Jahre
- CE-zertifiziert als Selbsttest zur Eigenanwendung

Clungene COVID-19 Antigen Rapid Test: 1er Pack und 5er Pack:

CLUNGENE COVID-19 Antigen Rapid Test CE1434	CE zertifiziert als Selbsttest zur Eigenanwendung	anterior-nasale („kurze Nase“) Proben	<u>Leistungsmerkmale:</u> Spezifität: 100 % Sensitivität: 95,5%	<u>Ergebnis:</u> in 15 Minuten <u>Haltbarkeit:</u> 24 Monate	PZN: 1er: 5911226 5er: 5911203	<u>Lagerung:</u> Vor Sonnenlicht schützen / 2°- 30°C
<u>1er Karton-Pack:</u> 400 Packs/Karton	<u>EAN Code 1er:</u> 6950921302711	<u>1er Karton-Maße:</u> 54 x 45,5 x 29 cm	<u>1er Gewicht/Karton:</u> 15 KG	<u>Europalette 1er:</u> 18 # = 7.200 Tests	<u>LKW 1er:</u> 237.600 Tests	Hersteller: Xiamen Wiz Biotech Co., Ltd., Xiamen City, China
<u>5er Karton-Pack:</u> 240 5er Packs/# = 1.200 Tests	<u>EAN Code 5er:</u> 6950921302728	<u>5er Karton-Maße:</u> 59 x 40 x 58 cm	<u>5er Gewicht/Karton:</u> 21 KG	<u>Europalette 5er:</u> 12 # = 14,400 Tests	<u>LKW 5er:</u> 95.040 5er Packs = 475.200 Tests	

Nähere Informationen und Anfragen:

Mag. Gerald Neumair, gn@alpstar.at, M: +43-664-4101918

Hr. GF Thomas Lachmann, TL@alpstar.at, M: +43-664-2453397

ALPSTAR Medical Products, eine Unternehmung der ALPSTAR Beteiligungs GmbH | GERLGASSE 2 | 1030 VIENNA | AUSTRIA

HG Wien, FN 457054p | UID ATU 71406203